

Ficha Técnica IU-MFFP3-14

Referencia	Descripción
IU-MFFP3-14	Mascarilla FFP3. Certificada por organismo notificado 0370.



ESPECIFICACIONES


Características	
Indicadas para	Filtración de partículas contenidas en el aire. Prevención en contagio por vías respiratorias.
Certificado	Sí, certificado EPI módulo B y C. Certificado por organismo notificado 0370. Organismo con capacidad para certificar EPI.
Tipo	FFP3 NR
Color	Blanco
Medidas	15.5cm*12cm (±5%)

Lavable	No
Almacenamiento	Temperatura: -5 a +50°C. Humedad relativa: <80%. Duración: 2 años desde la fabricación.
Información de Empaque	
Cajas de 25 unidades	
Características	
Eficiencia de filtración	≥ 99%
Resistencia Inspiración	< 350
Resistencia Expiración	< 250
Normativas	
EN 149:2001+A1:2009 Dispositivo de protección respiratoria. Mascarilla filtrante para protección contra partículas.	
Reglamento UE 2016/425 Personal Protective Equipment (Equipo de Protección Individual)	
Organismo Notificado: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS) nº 0370.	
Fabricación / Importación	
Fabricada por	Ningbo Lvtu Safety Technology Co.,Ltd., China
Modelo	LT2020-AP3
Importada por	SURGICALMED SL, España

ESTRUCTURA Y MATERIALES

Componentes	Materiales	Medidas Largo × Ancho
Pieza nasal	PE blanco, alambre de hierro revestido de plata	9cm (±5%) × 0.5cm (±5%)
Cinta	Nylon, spandex	30cm (±5%) × 0.7cm (±5%)
Cuerpo de la mascarilla	Tejido non-woven, Tejido soplado por fusión	15.5cm (±5%) × 12cm (±5%)
Botón ajustable	TPE blanco	1cm (±5%) × 0.5cm (±5%)

SURGICALMED

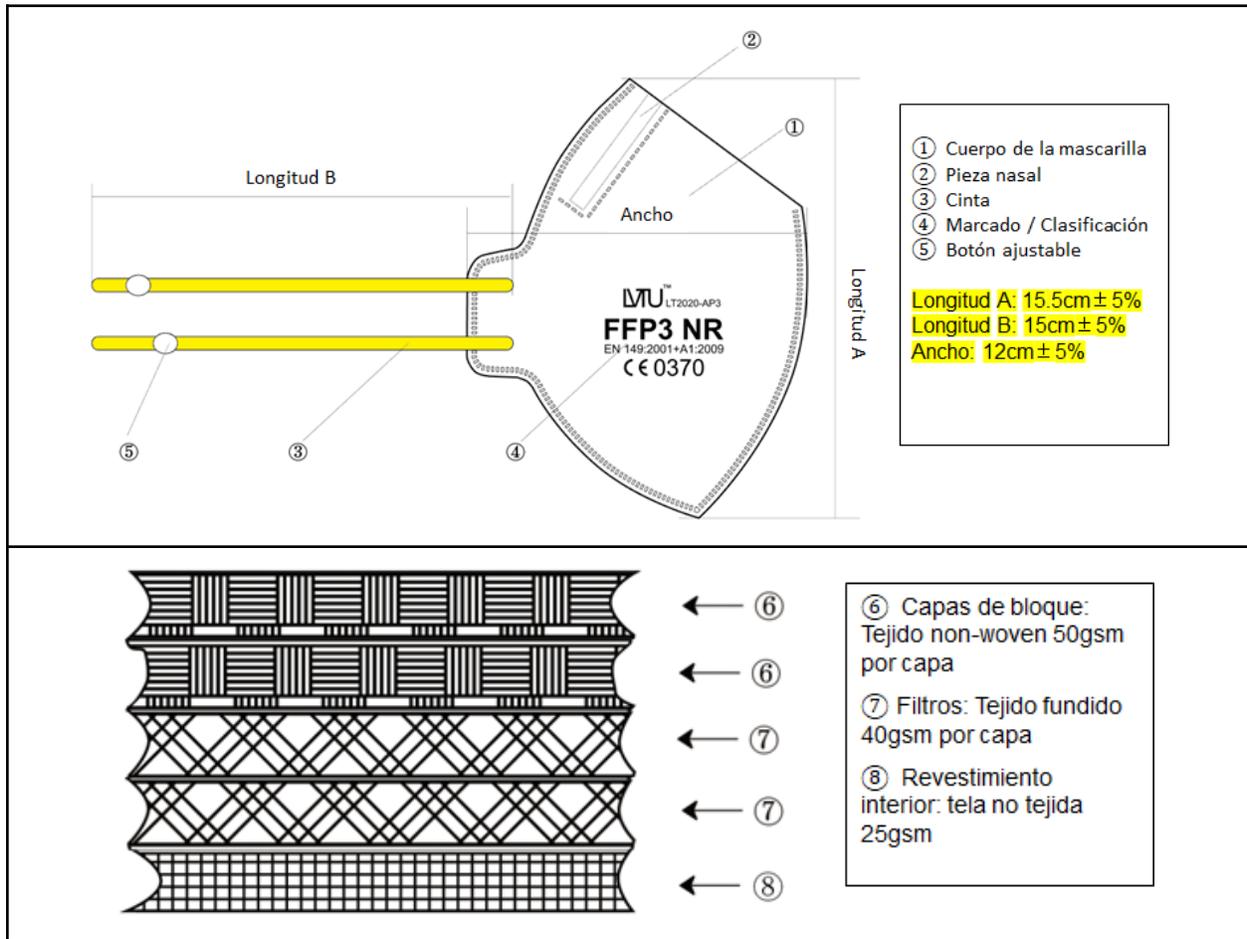

Diseño Empaque de 25 unidades



INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL USUARIO FINAL DE LAS MASCARILLAS

TIPO DE MASCARILLA	CARACTERÍSTICAS
<p>MASCARILLA HIGIÉNICA UNE 0064-1 UNE 0064-2 UNE 0065</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La mascarilla higiénica está destinada a personas adultas sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas.
<p>MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE</p> <p>UNE-EN 14683:2019+AC</p> <p>Protegen de dentro hacia fuera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Protege a los demás ya que están diseñadas para filtrar las partículas emitidas por el usuario durante la respiración, impidiendo que lleguen al exterior. - NO protege frente al contagio de quien la lleva SOLO limita la propagación del mismo. - Protege al usuario de salpicaduras de fluidos biológicos. - Usar en tareas que puedan generar salpicaduras o nebulizaciones de sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones. - Usar cuando vaya a estar a menos de 1 metro del paciente. - Usar durante el traslado del paciente, cuando éste no lleve puesta una mascarilla quirúrgica. - Usar el tiempo imprescindible. - Desechar la mascarilla al cambiar de paciente o actividad.
<p>FFP1 UNE-EN 149:2001+A1:2010</p> <p>Protegen de fuera hacia dentro.</p>	<p>78% de eficacia de filtración mínima, 22% de fuga hacia el exterior. Concentraciones ambientales hasta 4 VLA (Valor Límite Ambiental)</p>
<p>FFP2</p> <p>UNE-EN 149:2001+A1:2010</p> <p>Protegen de fuera hacia dentro</p> <p>Sirve para prevenir el contagio.</p>	<p>Protege y limita la propagación del contagio de quien la lleva. 92% de eficacia de filtración mínima, 8% de fuga hacia el exterior. Concentraciones ambientales hasta 12 VLA (Valor Límite Ambiental) Seguir indicaciones del protocolo “Medidas de aislamiento y otras precauciones para pacientes con enfermedades transmisibles”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usar en los casos indicados - Ajustar la superficie facial, cubriendo completamente nariz y boca, para proteger las membranas y mucosas. - Colocar fuera de la habitación y desechar al salir, en un recipiente cerrado colocado en el exterior.
<p>FFP3 UNE-EN 149:2001+A1:2010</p> <p>Protegen de fuera hacia dentro. Sirve para prevenir el contagio.</p>	<p>Protege y limita la propagación del contagio de quien la lleva. 98% de eficacia de filtración mínima, 2% de fuga hacia el exterior. Concentraciones ambientales hasta 50 VLA (Valor Límite Ambiental) Usar únicamente en los casos con RIESGO DE EXPOSICIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No está recomendado el empleo generalizado de mascarillas FFP3 en uso civil. Se deberá incidir en las prácticas correctas que eviten la formación de aerosoles.


Las mascarillas pueden tener válvula de exhalación. La válvula facilita la respiración y evita la condensación; se recomiendan para largos periodos de uso. **IMPORTANTE:** las mascarillas con válvula de exhalación no están recomendadas para pacientes ya que no filtran el aire exhalado por el usuario y no ayudarían a contener la propagación.

INSTRUCCIONES DE USO

1. No seguir todas las instrucciones y limitaciones sobre el uso de esta mascarilla y/o no usar esta mascarilla durante todo el tiempo de exposición puede reducir la efectividad de la mascarilla y como resultado pueda ser causa de enfermedad o muerte.
2. Antes de su uso, el empleador debe capacitar al usuario para el uso adecuado de la mascarilla de acuerdo con las normas de seguridad y salud aplicables. Los dispositivos de protección respiratoria deben seleccionarse según el tipo y la concentración de las sustancias peligrosas.
3. No lo utilice para protección contra gases, vapores por encima de los valores OEL o en una atmósfera que contenga menos del 17% de oxígeno.
4. el uso de esta mascarilla no está permitido en los contenedores no ventilados, minas o canales y tampoco deben permitirse usar en atmósferas explosivas.
5. Si la mascarilla está dañada o si el usuario tiene dificultad al respirar, éste debe abandonar el área contaminada, desechar y reemplazar la mascarilla. También debe abandonar el área contaminada inmediatamente si se presentan mareos u otras molestias.
6. Nunca altere ni modifique la mascarilla.
7. No la use con barba u otro vello facial que evite el contacto directo entre la cara y el borde de la mascarilla.
8. No use la mascarilla cuando la concentración de contaminantes suponga un peligro inmediato para la vida y la salud o se desconozca, o cuando la concentración de partículas supere el nivel máximo permitido u otros niveles determinados por las Autoridades nacionales de seguridad y salud ocupacional.
9. La mascarilla sólo se puede utilizar si se conocen el tipo y la concentración de las sustancias nocivas. En caso de sustancia o concentración desconocidas o condiciones variables, se debe utilizar un aparato de respiración.
10. Esta mascarilla filtrante cumple con las normas contenidas en el Reglamento EU 2016/425 relativo a equipos de protección individual.
11. El marcado de la mascarilla filtrante como "NR" , significa que no se puede utilizar durante más de un turno de trabajo, no reutilizar.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR CADA VEZ QUE SE UTILICE LA MASCARILLA

Antes de su uso, compruebe si hay daños visibles. No se debe utilizar la mascarilla si hay daños visibles o partes dañadas.

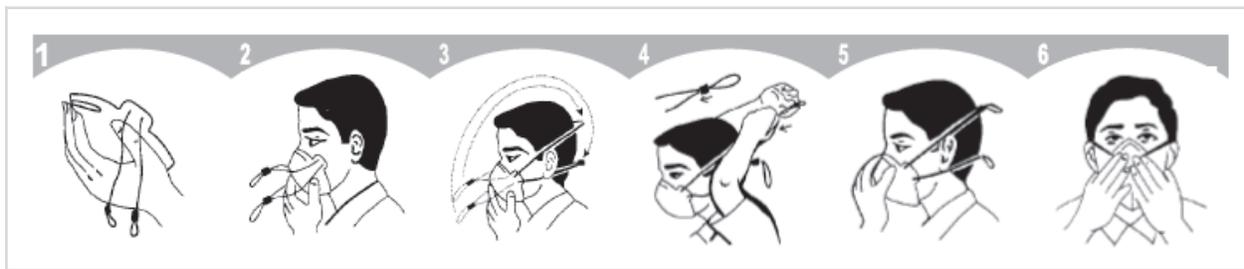

1. Coloque la mascarilla en su mano.
2. Con el clip nasal mirando hacia arriba, cubra la boca y la nariz con la mascarilla.
3. Coloque las cintas elásticas en la parte posterior de la cabeza y el cuello.
4. Mueva el botón Ajustable para ajustar las cintas de la cabeza y el cuello según sea necesario.
5. Presione el clip nasal ajustable para evitar fugas.
6. Para verificar el ajuste, coloque ambas manos completamente sobre la mascarilla y exhale. Si hay fugas de aire alrededor de la nariz, reajuste el clip nasal. Si hay fugas de aire en los bordes de la mascarilla, mueva las cintas hacia atrás a lo largo de los lados de su cabeza. Repita el procedimiento hasta que la mascarilla esté sellada correctamente.

Si no puede lograr un ajuste adecuado, NO ENTRE en el área contaminada. Consulte a su supervisor.

¿CÓMO ASEGURARSE DE QUE LA MASCARILLA ESTÁ BIEN AJUSTADA AL ROSTRO?

Para comprobarlo, el usuario debe realizar una comprobación de presión positiva y negativa, para verificar que se ha puesto correctamente la mascarilla y que la ha ajustado de forma efectiva al rostro.

Comprobación de presión negativa

Coloque ambas manos completamente sobre la mascarilla e inhale bruscamente. Tenga cuidado de no alterar la posición de la mascarilla. La mascarilla debería hundirse ligeramente hacia la cara. Si notas fugas de aire alrededor de su cara, ojos o nariz, reajuste el clip nasal y lo(s) elástico(s) y repita la comprobación de ajuste.

Comprobación de presión positiva

Coloque ambas manos sobre la mascarilla y exhale bruscamente. Si su mascarilla tiene una válvula de exhalación asegúrese de cubrir la válvula de exhalación cuando exhale. No debe salir aire de la mascarilla si está ajustada correctamente al rostro. Si se escapa el aire, ajuste lo(s) elástico(s) y repita la comprobación de ajuste.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

- Usar la mascarilla más adecuada en función del riesgo.

SURGICALMED

- Lávese las manos antes y después de usar la mascarilla.
- Colóquese la mascarilla antes de entrar a la zona contaminada y retírela fuera de la misma.
- Ajustar la mascarilla correctamente para conseguir una protección adecuada.
- No exceda la cantidad de usos recomendados por el fabricante.

¿CUÁNDO TIRAR LA MASCARILLA FFP3?

A medida que la mascarilla FFP3 se obstruye, se hace más difícil respirar; cuando esto ocurra, deséchela y use una nueva. Deseche la mascarilla si está deformada o rota, podría no ajustarse correctamente.

¿CÓMO RETIRARLA?

1. Lavarse las manos antes y después de retirarla.
2. ¡NO TOQUE La parte delantera de la mascarilla! ¡Puede estar contaminada!
3. Para retirar la mascarilla hay que hacerlo quitándola por las bandas elásticas, con cuidado y sin tocar la superficie central de la mascarilla.